

고품질의 표준화된 글로벌 헤어 이미지를 손쉽게 촬영

- ✓ Canfield의 Global Hair Device는 HairMetrix® 소프트웨어와 연동되어, 표준화된 가이드에 따라 이미지를 HairMetrix로 직접 캡처할 수 있는 환경을 제공합니다.
- ✓ 머리 받침대와 턱 받침대는 환자의 자세를 안정적으로 유지해 줍니다.
- ✓ SLR 카메라는 레일을 따라 부드럽게 이동하며, 각 촬영 위치에서 정확하게 고정됩니다.
- ✓ 카메라에 장착된 매크로 플래시는 선명하고 균일한 조명을 제공합니다.
- ✓ MatchPose® 라이브 이미지 오버레이 기능을 통해 기준 이미지에 맞춰 손쉽게 촬영할 수 있으며, 시간 경과에 따른 변화를 정확하고 비교 및 기록할 수 있습니다.



영상촬영예제



GOOD EXAMPLE
정수리에서 잘 빗겨진 머리



GOOD EXAMPLE
두피중앙에 잘 정리되었으며
깨끗하게 건조된 머리



GOOD EXAMPLE
방사형으로 잘 빗질된 머리



GOOD EXAMPLE
배경 마스크
깨끗하게 건조된 두피



BAD EXAMPLE
노출 F값 카메라 설정 오류
재 설정 필요 배경
마스킹 없음



BAD EXAMPLE
기울어진 머리
정수리 머리 정돈이 안 됨



BAD EXAMPLE
플랫폼의 별도 객체촬영
객체없애고 방사형으로 빗질요함



BAD EXAMPLE
방사형으로 빗질요함



BAD EXAMPLE
중심에서 벗어나며
방사형으로 빗질요함



BAD EXAMPLE
중앙부분 명확하게
정의가 안 됨



BAD EXAMPLE
정확한 머리 위치 아님



BAD EXAMPLE
머리는 젖지 않도록 하고
오일은 사용하지 않으며,
방사형으로 빗질요함